

IMBALLAGGIO DI TRASPORTO PER CAMPIONI MEDICI E BIOLOGICI - UNI EN 829 - LABORATORIO TOMA S.p.A. ADVANCED BIOMEDICAL ASSAYS



Kit materiale per spedizione



Inserire la spugna nel barattolo



Inserire le provette negli incavi della spugna



Chiudere il barattolo con l'apposito coperchio



Chiudere il fondo della scatola piegando prima i lembi 1 e 2



Poi estraendo la linguetta piegare il lembo 3



Infine chiudere il fondo piegando il lembo 4 ed assicurandolo con la linguetta



Inserire il barattolo



Chiudere la scatola piegando prima i lembi 5 e 6



Poi estraendo la linguetta piegare il lembo 7



Infine chiudere la scatola



Inserire la scatola nella busta di plastica



Rimuovere l'adesivo



Chiudere la busta utilizzando il lato adesivo